Handbuch zur Schnittstelle Vinzent – WOpticus

Inhaltsverzeichnis

1. Übergabe WOpticus – Vinzent	
2. Messung am Vinzent-Gerät	6
3. Übergabe Vinzent - WOpticus	
Export direkt nach der Messung	
Export nach der Glasberechnung	
4. Import der Daten in WOpticus	14

1. Übergabe WOpticus – Vinzent

Geben Sie in WOpticus die Daten Ihres Kunden ein oder öffnen Sie einen bestehenden Kunden mit Doppelklick auf einen Kunden in der Schnellstartleist unten. Legen Sie nun einen neuen Auftrag an. Hierzu gibt es mehrere Optionen, z.B. mit der Schnelltaste '5' um eine neue Gleitsichtbrille einzugeben, oder Sie klicken auf "Aufträge" und wählen z.B. eine Gleitsichtbrille aus. Wahlweise können Sie auch mit Doppelklick einen vorhandenen Brillenauftrag aus der unteren Liste auswählen und dann in der Auftragsmaske auf "Neu" klicken.

🗄 WOpticus														
Kunden Auftrag Drucken Sonstiges	Bearbeiten Ansicht <<	>> ?			_									
Kundennummer	01004088	Alter	40	Datur	n	13.02.2002	Aufträg	je	46	Status	; 1	Infos	Vorha	nden
Kundenname	Lietzow Dirk			Notiz		Vorhanden	Refrak	lionen	1	Mahn	0	Foto		Keine
Name	Lietzow				в	Briefanrede	Sehr g	eehrter	Herr Lietzow					м
Vorname	Dirk				к	Telefon	+31 46	439505	8		Führerso	hein	Nein	-
Geb. Datum / Email	14.07.1970	lietzow@wopticus	.de		E	Fax	+31 46	439505	9		Beihilfe		Nein	-
Straße und Nr.	Oude Heiweg 6				•	Handy	+31 6 5	105054	1		Werbung		Ja	-
Land / PLZ / Ort	NL 6136 XK	Sittard			8	Arbeit					Kontaktlir	isen	Ja	•
Region / Anrede	SON 🔽	Herm			-	L.Kauf / Werb.	03.11.2	010	14.01.2006		Hörgerät	e	Ja	-
Kassennummer	101576623		K-Art	VDAK	-	Versicherter				-	Sonstige	s 1		
Kassenname	TECHNIKER KRA	NKENKASSE				Arbeitgeber				- 19	Sonstige	s 2		_
Versicherungs-Nr.	42523452345		Status	1000 1		Bemerkung 1	Für alle Fragen rund um den WOpticus				_			
Versicherungsart	Mitglied 👻		Gültigkeit	0909		Bemerkung 2	Unter E)etails s	ehen noch w	eitere An	gaben zun	Kunden !		
Auftrag Nr. Auf	traggant	Da	+ 11m	Abaal	ha	Dochnung		1712	DC D	+ = = = = = =	7 Dog	ablt om		
Autoray Ni Aut	.craysarc	- Da	11 201	Abyai	be	Rectifiuity a		WK.	ים כם	a ao	Z Dez	anıı an		
T0110045159 GIe	schlinsen (2	e 03 6) 22	10 201	0			IN	15	P	0,00				
K01100009 Kon	taktlinsen (2	01	.07.201	0					P	0,00				
01090431.3 Gle	itsichtbrill	e 03	.07.200	9			Ν	DL	N 82	1,28	Vereink	arung	1	
BRI000/005 Sta	ndardbrief	03	.07.200	9		klantbrie	f			·		2		
SON0943119 Art	ikel	20	.01.200	9 20.01	L.20	09			1	0,00				~
	ischen D	etails S	uchen	Drucke	n	Aufträge	Ref	raktion	Speid	hern	Ne	J	Zurück	;
<< >> Lä	ischen De	etails Si	uchen	Drucke	n	Aufträge	Ref	raktion	Speic	hern	Ne	,	Zurück	

Machen Sie einen neuen Auftrag oder wählen Sie einen bestehenden Auftrag aus der Übersicht:

Durch Doppelklick öffnen Sie den Auftrag. Um möglichst viele Daten an die Schnittstelle zu übertragen, können hier die Refraktionswerte einfach über die Tastatur eingeben werden. Noch schneller geht's mit der Datenübernahme. Einfach auf das gezeigte Symbol klicken oder F2 drücken und mit Pfeiltasten 'Übernahme aus Altaufträgen' auswählen.



Wir machen eine Datenübernahme aus Alt-Aufträgen. Der letzte Auftrag wird an der rechten Bildschirmhälfte angezeigt. Auf Übernahme klicken oder mit ENTER auswählen um die Refraktionsdaten in den Neuauftrag zu übernehmen.

WOpticus Auftragswerte						
Kunde : Auftragsart :	Lietzow Dirk Gleitsichtbrille	Kundennr.: Auftragsnr.:	01004088 Neueingabe	Auftragsnr.: Gleitsichtbrille	0110043139 Datu Lfnr.	m : 03.11.2010 : 18
± SPH ± R + 2,50 - L + 2,75 +	CYL Achse Prisma Bas 1,50 10 3,00 1,75 1,75 15 5,00 1,75	is Add Pd Nth X 20 1.00 31.5 13.8 2 25 1.25 29.5 13.8 2	Y Visus sc/cc 5 2.7 17.3	± SPH ± R + 2,50 - L + 2,75 + X Y N	CYL Achse Prisma 1,50 10 3,00 1,75 15 5,00 th Visus sc cc 10	Basis Add Pd 20 1.00 31.5 25 1.25 29.5 Glaspreis
Lieferant Ma R RUPP <u>-</u> K L RUPP <u>-</u> K	t. Glasbezeichnung/Tönt ▼ 396 GH ▼ 396 GH	ung/Entspiegelung/Sonstiges	Ø • 60 • 5 • 55 • 5	R 22.7 17.3 L 20.7 17.4 Lieferant RUP	13,8	0,00
Lieferant Kollek.	Modell Farbe (Größe Büg L Arbeit	Sonst./Etui	Glasbezeichnung/Er R 396 GH L 396 GH Fassung :	ntspiegelung/Tönung/Sons	tiges Ø 60 55
F Refraktion Bemerkung		vom	Rezept Privat V	Refraktionist : Bemerkung : Was soll übernomme	en werden ?	Refraktionsweite
Bestellt Glas Beste	Ilt Fass Kontrolle	Anzahlung Abgabe F	Rechnung Bezahlt	⊠ Rechts ⊠ Links	Bemeikung	Gisser Preise Fassung Refraktionist
<< >>	Löschen	Details Rechnun	ng Drucken		Übernahme	Schließen

Sind die Refraktionswerte eingetragen, klicken Sie bitte oben auf den Menüpunkt "Beratung":

	Opt	icus										
Auftra	gЕ	ingabe	Druck	(en	Beratung	Spezial	Bear	beiten	<<	>>	?	
Kunde : Lietzow Dirk												
A	Auftragsart : Gleitsichtbrille											
	±	SF	ЭН	±	CYL	Ach	nse	Prisn	na	Bas	sis	Add
R	+	2	2,50	-	1,5	0	10	3	,00		20	1,00
L	+	2	2,75	+	1,7	5	15	5	,00		25	1,25

Um die Daten an Vinzent zu übergeben, klicken Sie in dem sich öffnenden Beratungsmenü auf "Vinzent":



WOpticus übergibt nun automatisch die Daten an Vinzent.

Wenn e-cado bisher noch nicht geöffnet war, öffnet sich jetzt das Programm mit dem Login-Fenster. Die Zugangs-Daten des zuletzt angemeldeten Users werden angezeigt. Klicken Sie auf Login:



Das Programm öffnet sich mit dem Fenster der Kundenauswahl. Wenn vorhanden, werden bereits gespeicherte Videoaufnahmen gezeigt. Wenn nicht, müssen Sie nun die Messung am Vinzent-Gerät vornehmen.

2. Messung am Vinzent-Gerät

Der neue Kunde kann nur am Vinzent-Gerät angelegt werden. Gehen Sie nun zum Vinzent-Gerät und führen dort die Messung durch. Klicken Sie dort ebenfalls auf Login. In unserem Fall ist noch kein Kunde gespeichert. Geben Sie nun den Namen der Kundin in dem Feld 'neue Aufnahme für ...' ein, indem Sie einen Doppelklick darauf machen:

do 5.40	VINZENT BERATUNG AUFTRÄGE	SYSTEM I-SITE CALWIN	HILFE	
nt Ver. 6.1.2.24	Videoaufnahme			
denauswahl			Suchen	
	Name	Messaufnahme	Messauswertung	Fassung
sung	neue Aufnahme für			U.S.
	Balduin Testmann 🛛 📉	20.02.2009 12:22	11.11.2010 13:14	
ung	Eva Testmeier	17.02.2009 17:43	02.07.2009 14:10	
	Alois Obertester	17.02.2009 16:07	10.11.2009 16:44	
	Georg Tester	15.12.2008 12:05	11.11.2010 13:17	

Geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf 'Enter':

Videoaufnahme			
		Suchen	
Name	Messaufnahme	Messauswertung	Fassung
Eva Testmeier			

Es öffnet sich das Start-Fenster für die Messung. Links in der Menüleiste können Sie von hier aus zurück in die Kundenauswahl navigieren oder in die Funktion Videofassungsauswahl, um den

Kunden mit verschiedenen Fassungen aufzunehmen. Das -Symbol ermöglicht Ihnen - zu jedem Zeitpunkt während der Messung - zu diesem Bildschirm zurückzugelangen.

🔤 e-cado by ru	pp und hubrach	
e-cado 5.14	VINZENT BERATUNG AUFTRÄGE SYSTEM I-SITE CALWIN	
Vinzent Ver. 6.0.1.26 Kundenauswahl Messung Fassung	Activisu Messung der Trageparameter Messung der Trageparameter PD/Höhe Vorneigungswinkel HSA FassScheibenw.	
	verhaltensspezifische Messungen	4 2
		Ergebnisse 3 Drucken Speichern 5

Ein Klick auf das Kamerasymbol 'Trageparameter' (1) startet einen neuen Messvorgang zur Ermittlung der Zentrierpunktlagen, Hornhautscheitelabstand, Fassungsvorneigung und Fassungsscheibenwinkel. Ein Klick auf den Papierkorb (2) löscht das jeweils angezeigte Bild.

Der Schalter Ergebnisse (3) führt Sie zu den Ergebnissen der Messungen. Dieser Knopf wird erst nach einer erfolgten Video-Messaufnahme mit Auswertung aktiv.

Zur Bestimmung des Kopfneigungswinkels für ysis-Gläser klicken Sie auf das Kamerasymbol 'Kopfneigung' (4).

Speichern (5) übernimmt Ihre Messungen in die Kundenauswahlliste.

Klicken Sie nun auf das Kamerasymbol 'Trageparameter', um mit den Messungen zu beginnen:

Nachdem der Kunde richtig vor dem Gerät positioniert und der Messaufsatz korrekt auf der Fassung platziert ist (siehe Bedienerhandbuch zu Vinzent), sehen Sie nun das Videolivebild Ihres Kunden:



Starten Sie nun die Messung. Die Details zur Messung entnehmen Sie wiederum aus dem Bedienerhandbuch zu Vinzent. Klicken Sie nach erfolgter Messung rechts unten auf OK:



Um nun noch den Kopfneigungswinkel zu messen, klicken Sie auf um zum Startbildschirm zurückzukehren und klicken dann auf das Kamerasymbol 'Kopfneigung'.

verhaltensspezifische Messungen



Kopfneigungswinkel



Wenn Sie auch hier die Messungen durchgeführt haben, gelangen Sie zurück zum Startbildschirm der Messung und sehen eine Voransicht der aufgenommenen Messbilder:

- Messung der Tragepal	PD/Höhe Vorneigungswinkel HSA FassScheibenw.		I
verhaltensspezifische	Messungen	0.4°	P
			Ergebnisse

Klicken Sie auf Ergebnisse, um einen Überblick der durchgeführten Messungen zu sehen:



Wählen Sie zur Erhöhung der Genauigkeit das Fassungsmaterial aus (da die Scheibenlänge und – höhe nur bis zum sichtbaren Glasrand ermittelt wurde, führt die Wahl des Fassungsmaterials zur Berücksichtigung der Nutentiefe). Klicken Sie jetzt auf 'Speichern'.

3. Übergabe Vinzent - WOpticus

Export direkt nach der Messung

Sie können nun an Ihren Rechner gehen, um mit dem Vorgang fortzufahren.

e-cado by rupp und hubrach									
e-cado 5.40	VINZENT BERATUNG AUFTRÄGE SYSTEM I-SITE CALWIN HILFE								
Vinzent Ver. 6.1.2.24									
Kundenauswahl		:	Suchen						
	Name	Messaufnahme	Messauswertung	Fassung					
Messung	neue Aufnahme für			, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
	Balduin Testmann	20.02.2009 12:22	11.11.2010 13:14						
Fassung	Eva Testmeier	17.02.2009 17:43	02.07.2009 14:10						
	Alois Oberteste	17.02.2009 16:07	10.11.2009 16:44						
	Georg Tester	15.12.2008 12:05	11.11.2010 13:17						

Wenn mehrere Messungen vorhanden sind, können Sie aus einer Liste auswählen (siehe oben). Wählen Sie nun Ihren Kunden durch Doppelklick aus und drücken Sie auf Speichern. Sie können nun auswählen, ob Sie die Werte jetzt übergeben wollen:

Bestätigung
Die ermittelten Daten stehen zur Übergabe an Ihre Verwaltungssoftware bereit. Die Zentrierhöhen beziehen sich auf Hauptblickrichtung. Möchten Sie die Werte jetzt übergeben?
Abbrechen

Bestätigen Sie diese Information mit ,Weiter' wenn Sie keine Glasberechnung machen wollen. Die Daten sind nun exportiert. Wechseln Sie nun zu WOpticus.

Und lesen Sie weiter bei Punkt 4. Import der Daten in WOpticus.

Export nach der Glasberechnung

Wollen Sie nach der Messung noch eine Glasberechnung anschließen, klicken Sie auf "Abbrechen" um in e-cado/Vinzent zu bleiben.

Sie befinden sich jetzt im Beratungsbildschirm von e-cado. In den Feldern der Glaswerte werden die übertragenen Daten aus WOpticus angezeigt.

≌e-cado by ru	upp und hubrach
e-cado 5.40	VINZENT BERATUNG AUFTRÄGE SYSTEM I-SITE CALWIN HILFE
neuer Auftrag	
Kundendaten	
Fassung Zentrierung	SPH CYL ACHSE ADD Ø PRIS 1 BAS 1 PRIS 2 BAS 2 PRIS res BAS res
Bohrung	R +2,50 -1,50 10 1,00 3,00 20 0,00 0 3,00 20
Glasauswahl	Image: box ± <th±< td=""></th±<>
Grafik	
	🔽 Kunststoff 🔽 Silikat 🔽 Farbl <u>o</u> s 🦳 <u>P</u> hototrop 🗌 So <u>n</u> der
	Import Zentrierdaten Daten löschen Ausführung Glasberechnung

Sie können nun eine Glasberechnung durchführen, wenn Sie auf den entsprechenden Schalter klicken. Die Beschreibung der Glasberechnung finden Sie in dem Handbuch zu e-cado.

Am Ende der Glasauswahl befinden Sie sich im Bestellbildschirm:

🔤 e-cado by rup	op und hub	rach								
e-cado 5.40	VINZENT BI	RATU	IG AU	JFTRÄ	GE S	YSTEM	I-SITE CAL	WIN	HILFE	
neuer Auftrag	Firmenname	test	st Kundennummer 99999900							
Kundendaten	Kundenname	Testme	eier				Kommission	008	Testme	Lieferdatum
Fassung Zentrierung	Sph	Cyl	A 10	Add	Pr Res	Bas Res	Glasty; HP YSISnaviso 1.7	0 4GS	Ø	
Bohrung	L +2,75	+1,75	15	1,25	5,00	25	HP YSISnaviso 1.7	4GS	55	
Glasauswahl Grafik	Ausfüh R DUN,RUN,FL L DUN,RUN,FL	rung A A	V GH,VLS GH,VLS	eredelun	g	F Braun 12% Braun 12%	arbe ,		Bemerku Test rechts Test links	19
	R	Ŧ	\sum		Ŧ		L	Länge Höhe Brücke	40,8 32,3 17,7	Fassung Voll V Material
		ZF R 31, L 29,	P.x ZP.y 5 17,3 5 17,4	'b'	HSA 14,5		l	Face R	ette L	age mm Politur Gravur
	KN 1 Präf	IZ L IZ L IN	A 📃	FVN	FS	WV 4	AK Vornam	ie Egon		Nachname Testmeier
	Export	Zurü	ck							Drucken Speichern
	K									

Klicken Sie nun auf 'Export', um die Daten an WOpticus zu übergeben. Es erscheint wieder die Information:



Klicken Sie auf ,Weiter'. Wechseln Sie nun zu WOpticus.

4. Import der Daten in WOpticus

Sie befinden sich nun wieder im Hauptfenster des Auftrags. Klicken Sie jetzt auf den Button für die Datenübernahme (1) und wählen Sie dann ,Übernahme aus Beratungsprogramm' und dort dann ,Vinzent' (2):

A	WC uftrag)pti i Ein	c us gabe Dru	cken E	Beratung S	pezial Bea	rbeiten <<	>> ?											
	Ku	Inde			Liet	zow Dir	k				Kunder	inr.:		0100	04088	Lfnr.:	10 /	17	
	Au	uftra	gsart :		Gle	itsichtbr	ille				Auftrage	snr.:		010704	13092	Status :	N		Rechnung
	R	± +	SPH 1,25	± +	CYL 0,75	Achse	Prisma	Basis	Add 0,75	Pd 29,9	Nth 4,7	× 23,4	Y	Visus so	c/cc	Bozoiobo bernahme aus Altau Übernahme aus Refra	urba ifträge aktionsprotoko		
	LĴ	+	1,00	+	1,00	90			0,75	39,1	5,5	32,6		5,5 1		Ubernahme aus Bera Übernahme von rech Übernahme aus Glast Importieren	tungsprogram ts nach links peratung	n •	WOpti-Face Winfit Opsys Hoyalog
		Liefe	erant	N	vlat. (Glasbeze	ichnung	/Tönuno	/Entspie	aeluna/S	onstiaes.			ø			2-	K	Visioffice Vinzent

Es öffnet sich das Pop-Up ,WOpticus – Import – Zentriersysteme' mit dessen Hilfe Sie bestimmen können, welche Daten Sie importieren wollen.

	WOp	ticu	is - I	mpor	t - Z	entr	iersy	ster	ne		×	
Da Da Füi	i tenüb ten vom r den Ku	ernahı n Systei inden :	me m :	Vinzent				G	Ð	The	I	
☐ Refraktionswerte übernehmen												
R L	± SF + 2, + 2,	PH ± 50 + 75 +	CYL 1,50 1,75	A* Pris 10 3,00 15 5,00	: Bas) 20) 20	Add 1,00 1,25	Glasbea 050003 050003	zeichnur 3112 3112	ng		Ø 60 55	
₽ R L	Zentr FVW 0,0 0,0	ierwei FSW 21,7 21,7	r te übe HBox 32,30 32,30	VBox 40,80 40,80	n Pd 31,5 29,5	Nth 13,8 13,8	X 22,7 20,7	Y 17,3 17,4	HSA 14,5 14,5	ERCD 0,0 0,0	AzG 17,7	
ঘ	Form	daten	überne	ehmen								
	(Übernahr Abbruch							

Standardmäßig sind alle möglichen Wertebereiche bis auf die Refraktionswerte angehakt, die üblicherweise nicht wieder importiert werden müssen. Im folgenden Beispiel übernehmen wir die standardmäßig vorgegebenen Wertebereiche. Klicken Sie auf "Übernahme".

Die Refraktionswerte sind nun ergänzt um weitere Messwerte: Pupillendistanz (Pd) (1), NtH (vertikale Zentrierpunktlage bei Einstärken- und Gleitsichtgläsern sowie Zusatzteilhöhe R bei Bifo/Trifogläsern) (2) sowie die Zentrierdaten (Koordinaten zur x-Achse (3) und die Koordinaten zur Y-Achse (4)):

	W	Opti	icus																
Au	iftrag	g Ei	ngabe Druc	ken B	Beratung Sp	ezial Bea	rbeiten <<	>> ?											
	Kı Aı	und uftra	le: agsart:		Lietzow Dirk Gleitsichtbrille							Kundennr.: Auftragsnr.:				01004088 0107043092			
		±	SPH	±	CYL	Achse	Prisma	Basis	Add	P	d	N	h	×	Y	V	ïsus sc/co	>	I
	R	+	1,25	+	0,75	120			0,75		29,9	7	4,7	23,	4	4,7			
	L + 1,00 + 1,00 90								0,75		39,1		5,5	32,	9	5,5			
									1		2		31	4		\smile			

Haben Sie eine Glasauswahl in e-cado getroffen, werden die Daten dazu direkt unter den Messwerten angezeigt:

	Lieferant	Mat.	Glasbezeichnung/Tönung/Entspiegelung/Sonstiges		ø		
R	Rupp 🝷	-	396 GH Vapalit Super grau 12%	•	6 0	-	5
L	Rupp 🝷	-	396 GH Vapalit Super grau 12%	•	60	•	8

Im Fenster ,Details' finden Sie weitere Messdaten. Klicken Sie dazu auf den gleichnamigen Button unten:

						The second s		
<<	>>	Löschen	Details	Rechnung	Drucken	Speichern	Neu	Zurück

Hier finden Sie die weiteren Messdaten:



Boxhöhe (Höhe) (1), Boxbreite (Länge) (2), Hornhautscheitelabstand der Refraktion (HSAR, wird in WOpticus errechnet) (3), Hornhautscheitelabstand der Fassung (HSAF) (4), Vorneigungswinkel

(FVW) (5), Fassungsscheibenwinkel (FSW) (6), Z (7), Brückenweite (AzG) (8), Mindestranddicke (MRD) (9) und Kopfneigungswinkel (KN) (10).

Die Werte der biometrischen Messung von b' / Augendrehpunktlage horizontal (ERCD) finden Sie im rechten Teil des Fensters:

nr.:	C	010040	88	Lfnr.		18		20
snr.:	011	00431	Statu	ls :	N	01		
z	P	Q	HDEC	ER		LPD)	
31,5	0,0	0,0			2,9	0),0	
29,5	0,0	0,0			2,8	0	0,0	
	nnr.: snr.: Z 31,5 29,5	nnr.: 011 snr.: 011 Z P 31,5 0,0 29,5 0,0	anr.: 0100403 snr.: 011004314 Z P Q 31,5 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0	Annr.: 01004088 Annr.: 0110043140 Z P Q HDEC 31,5 0,0 0,0 100	anr.: 01004088 Lfnr. snr.: 0110043140 Statu Z P Q HDEC ERG 31,5 0,0 0,0 1	anr.: 01004088 Lfnr.: snr.: 0110043140 Status : Z P Q HDEC ERCD 31,5 0,0 0,0 2,9 29,5 0,0 0,0 2,8	anr.: 01004088 Lfnr.: 18 snr.: 0110043140 Status : N Z P Q HDEC ERCD LPD 31,5 0,0 0,0 2,9 0 29,5 0,0 0,0 0,0 2,8 0	anr.: 01004088 Lfnr.: 18 / snr.: 0110043140 Status : N 0 Z P Q HDEC ERCD LPD 31,5 0,0 0,0 2,9 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0

Klicken Sie nun unten auf der Leiste auf "Zentrierung":

In the second second		The subscription of the su						
~~	>>	Wertschätzung	Details	Zentrierung	Vereinbarung	Ratenzahlung	Speichern	Zurück
ຈະ ດ້າງກາງກາວໃ	ก็อาการอาจรัง		Winner turn a scale .				a Marine and a second sec	

Es öffnet sich das Fenster ,Zentrierung' mit einer grafischen Darstellung der Zentrier- und Formdaten:



Wurde in Vinzent eine Form eingegeben, dann wird diese auch zum Auftrag gespeichert.